


NOTICE

ZI DE LA GARE
2 ROUTE DU RAZAT
43210 BAS EN BASSET

BLOUSE BLEUE TRANSLUCIDE A USAGE UNIQUE JETABLE

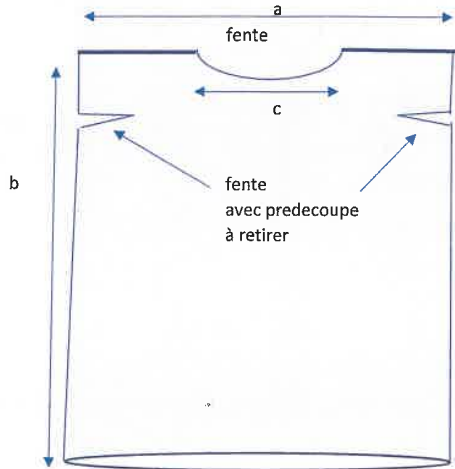

en mm	a	b	dim cou	dim manche si trou sinon fente 7/8 cm	epaisseur	
taille M	700	1050/1100	350	200	25 µ	
taille L/XL	780	1150/1200	350	200	nb/carton	400 un

carton de 8 paquets de 50 unités avec taille indiquée sur carton et notice d'utilisation à l'intérieur
livraison par carton ou palette

!!! Possibilité d'ajouter des manches auto-adhésives → cf: doc ci-jointe

notice d'utilisation

Cette sur-blouse est fabriquée en polyéthylène base densité radicalaire, elle n'est pas barrière, mais protège des salissures et éclaboussures. Elle ne peut être portée de façon continue.

Cette sur-blouse est apte au contact alimentaire et peut être utilisée dans le milieu de l'agro-alimentaire, l'industrie, le milieu médical et vétérinaire.

Cette sur-blouse ne doit pas être exposée à la chaleur, la température de ramollissement de la matière est de 80 °C

MANCHES BLEUES AUTO-ADHESIVES POUR BLOUSE
avec serrage aux poignets

Mode d'emploi à visionner ici (flasher le QR CODE)



Carton de 800 unités	Epaisseur 35µ
Dispositif de serrage au poignet inclus	Nb/carton 800 640mm + rabat adhésif de 70 mm

A monter avec le corps de la surblouse.

- Oter la protection de l'adhésif aux manches avant de les enfiler et de rabattre l'adhésif sur le haut des épaules.
- Passer les bras par les ouvertures en haut de la surblouse.
- Bien ramener toute la surblouse vers les épaules
- Ouvrir le passage de la tête et placer une main en haut et une en bas du passage.
- Enfiler la surblouse en prenant soin de garder sous le menton la partie avant de la blouse afin de ne pas toucher le masque à l'enfilage.
- Pour le déshabillage, déchirer depuis l'arrière en emportant ensuite les manches avec le tout.
- Se servir des élastiques pour emballer la surblouse usagée et réduire les risques de contaminations.